

راهنمای نصب و راه اندازی سریع دستگاه Meg 2 (جدید)

دستگاه را روشن کنید. چنانچه مشکل فنی در قسمتی از دستگاه مشاهده گردد، کد خطای مربوطه روی نمایشگر نمایش داده می شود. (جهت اطلاع در مورد کدهای خطا به دفترچه راهنما مراجعه فرمایید)

برای جلوگیری از دریافت هرگونه خطای غیر واقعی، نباید در هنگام روشن کردن دستگاه و طی مرحله **Self Checking** هیچ کدام از لوازم جانبی به سیستم متصل باشند.

با فشردن یکی از کلید ها، حالت **Selfcheck** پایان یافته و دستگاه وارد حالت آماده به کار می شود. در این صورت نمایش برنامه کاربری از حالت چشمک زن خارج شده و به صورت ثابت نمایان می گردد.

نحوه استفاده از Bipolar:

با استفاده از کلید در نظر گرفته شده در پنل جلو، پدال را به کانکتور **Bipolar** اختصاص دهید. در صورتی که حالت **AutoStart** انتخاب شده باشد، با قرار دادن پنست بایپلار روی بافت، دستگاه به صورت خودکار فعال می گردد.

نحوه استفاده از Sealing:

با استفاده از کلید در نظر گرفته شده در پنل جلو، پدال را به کانکتور **Sealing** اختصاص دهید. سوئیچ دستی ابزار و یا پدال پایی را فشار دهید. اتمام پروسه **Sealing** بطور خودکار توسط دستگاه تشخیص داده شده و فعالیت دستگاه متوقف می گردد.




با توجه به اینکه مد **Bipolar** فقط با پدال کار می کند، در صورت نیاز به استفاده همزمان از مد **Seal** و **Bipolar**، میتوانید مد بایپلار را با پدال فعال نموده و مد **Seal** را با استفاده از سوئیچ دستی فعال کنید. همچنین برای استفاده همزمان می توانید از **Bipolar** در حالت **AutoStart** استفاده نمایید.



در صورت عدم تکمیل پروسه **Sealing**، نمایشگر دایره ای به رنگ نارنجی در می آید که معادل خطای **Regrasp** می باشد در این شرایط ابزار را باز کرده و بافت را دوباره بگیرید و مجدداً دستگاه را فعال کنید. جهت اطلاع از دلایل ایجاد هشدار **Regrasp** به راهنمای استفاده از دستگاه مراجعه فرمایید.

انتخاب ابزار مد Sealing:

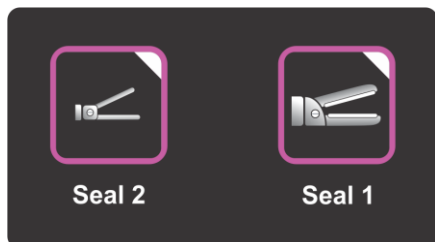

Seal1: این مد برای انواعی از ابزارهای جراحی طراحی شده که سطح تماس بیشتری با بافت داشته و انرژی بیشتری احتیاج است تا عروق بطور کامل Seal شوند. (مشهور به ابزارهای ۱۰ میلی متری)

Seal2: این مد برای انواعی از ابزارهای جراحی طراحی شده که سطح تماس کمتری با بافت داشته و انرژی کمتری احتیاج است تا عروق بطور کامل Seal شوند. (مشهور به ابزارهای ۵ میلی متری)

چنانچه در هر کدام از مراحل بالا مشکلی مشاهده فرمودید، با تلفن ۰۹۱۲۶۳۹۸۳۸۵ تماس حاصل نموده تا راهنمایی های لازم انجام شود.
واحد خدمات پس از فروش شرکت مهندسی گاوندیش سیستم