


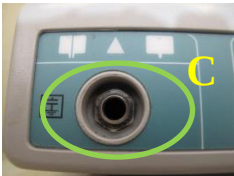

روشن کردن دستگاه و Self Check

	پس از اطمینان از سلامت ظاهری دستگاه، کابل برق را متصل نموده با استفاده از کلید برق اصلی در پشت دستگاه آن را روشن کنید. ⚠ هشدار : برای اطمینان از رعایت مسائل ایمنی و زمین شدن مناسب دستگاه، از پریزهای ارت دار استفاده نمایید.
	پانل جلوی دستگاه روشن شده و دستگاه شروع به تست قسمت های مختلف خود می نماید. پس از بررسی، چنانچه مشکل فنی در دستگاه مشاهده گردد، گزارش خرابی مربوطه صادر می شود که بروی صفحه نمایش LCD قابل رؤیت است. در صورتیکه پس از مراحل Self-Checking بررسی انجام شده با موفقیت پایان یابد، پیغام روبرو برای لحظاتی بروی نمایشگر LCD ظاهر می گردد.
سپس پیغام WELCOME TO MEG1-E... بروی نمایشگر LCD ظاهر می شود. یکی از دکمه های پانل را به دلخواه فشار دهید تا سیستم به حالت نرمال رفته و آماده کار گردد.	

آماده سازی دستگاه جهت استفاده در عمل جراحی

	۱- برای برش کافی است یکی از مدهای PURE یا BLEND را انتخاب نمایید و با توجه به نوع سر قلم، توان مناسب را تنظیم کنید. هر چه سر قلم ضخیم تر باشد نیاز به توان بیشتری دارد. لذا برای سر قلم های سوزنی انتخاب توان از حدود ۱۰ وات و برای سر قلم های چاقویی از حدود ۳۰ وات پیشنهاد می شود.
	۲- پلیت را به کانکتور (C) دستگاه متصل نمایید. به محض اتصال مناسب پلیت به محل های پر خون و SHAVE شده بیمار، چراغ سبز پلیت روشن می شود. سپس قلم مونوپلار را نیز به خروجی Mono متصل نمایید.
	۳- برای انجام انعقاد به صورت مونوپلار کافی است یکی از مدهای FORCED, FULGURATION یا PULSE SPRAY را با توجه به نوع سر قلم، توان مناسب را تنظیم کنید. هر چه سر قلم ضخیم تر باشد نیاز به توان بیشتری دارد. لذا برای سر قلم های سوزنی، لوپ انتخاب توان از حدود ۱۰ وات و برای سر قلم های چاقویی، کروی از حدود ۳۰ وات پیشنهاد می شود. ۴- برای انجام انعقاد به صورت بایپلار کافی است با توجه به تصمیم جراح در خصوص نوع فعال نمودن دستگاه، یکی از مدهای BIPOLAR را انتخاب نمایید. و کابل بایپلار را به خروجی Bi متصل نمایید.
	۵- پدال را به کانکتور (e) مربوطه در پشت دستگاه متصل نموده، با فشردن پدال زرد مدهای CUT فعال می شود با فشردن پدال آبی مدهای COAGE فعال می شود

تنظیم شدت صوت

	برای تنظیم شدت صوت، پس از فعال کردن دستگاه، می توانید توسط دکمه های بالا و پایین در زیر نمایشگر LCD استفاده نمایید.
---	--